

ORTHO
SYSTEMS

2000
2026

Jahre bewegt



Exzellenz in der Neuro-Orthopädie


Ihr Patient – Unser Beitrag

Auszug
aus dem
Katalog

Orthetik 14.0
gültig ab 01.07.2026

Mit der Anziehhilfe Rudi unterwegs

Der Alltagsassistent trägt zu einer stabilen und komfortablen Sitzposition für Anwender von Orthesen mit Streckhilfe in einer Vielzahl von Alltagssituationen bei, sei es im Rollstuhl, im Sessel, auf dem Bürostuhl oder im Fahrzeug. Die Möglichkeit, das Knie in einer Position zu fixieren, sorgt für eine sichere Beinpositionierung, erhöht den Sitzkomfort und erleichtert Positionswechsel sowie Transfers.

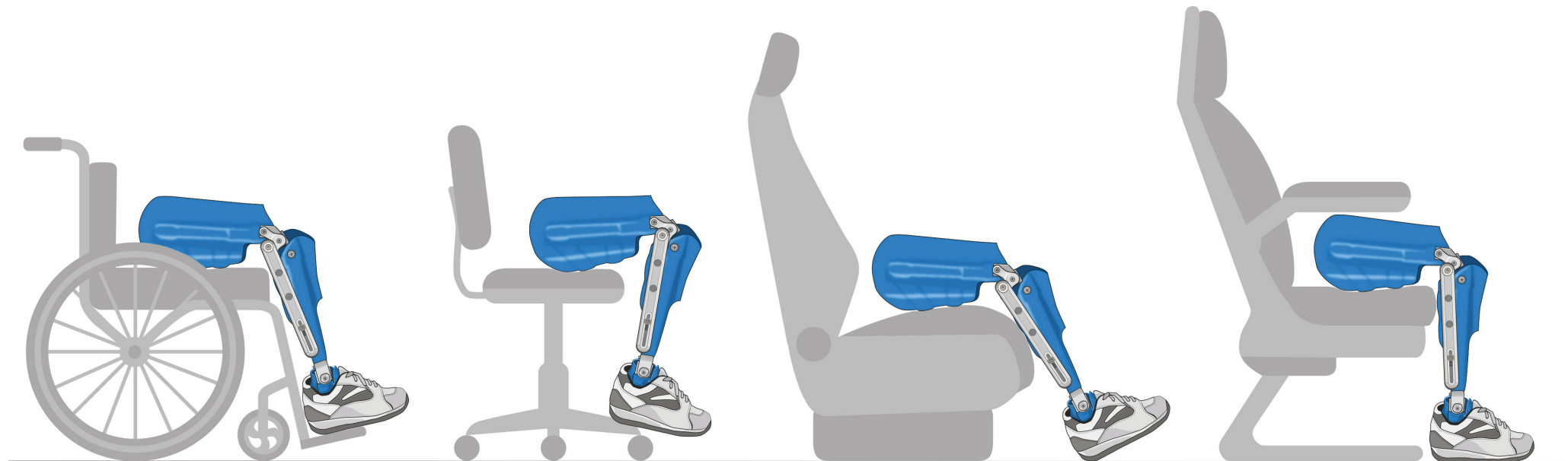

Rollstuhl


Bürostuhl

Autositz


Flugzeug/Bahn

Anwendungsbereiche der Anziehhilfe

Je nach Situation ist eine Kraftunterstützung nicht immer notwendig, zum Beispiel wenn die Gehorthese auch nachts getragen wird und in der Regel eine geringere Kraft erforderlich ist. Mit der Anziehhilfe Rudi lässt sich diese einfach entnehmen und ebenso leicht wieder aufstecken oder gegen eine mit einer anderen Kraft austauschen. Mithilfe der Anziehhilfe lässt sich die Knieposition auch in der Nacht stabil und sicher fixieren.

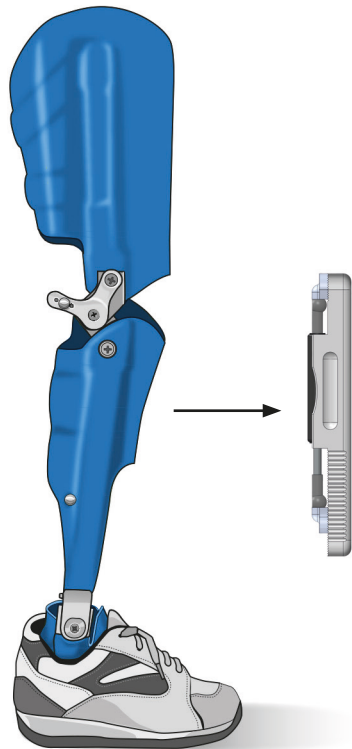

G-Dämpfer
temporär entnehmen

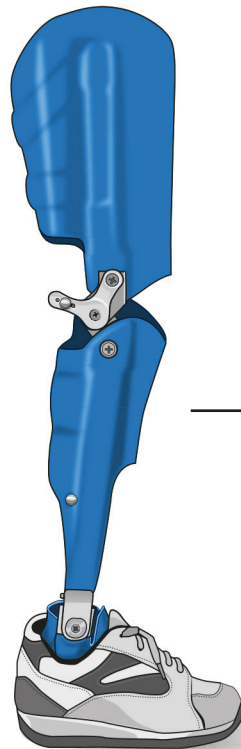


tagsüber


Tausch der Krafteinheit



nachts

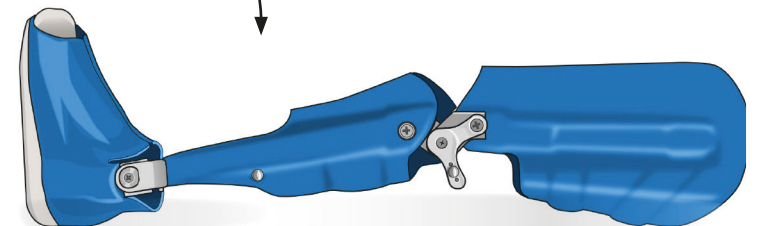


Nachtlagerung mit spezieller Kraft
oder ohne Krafteinheit

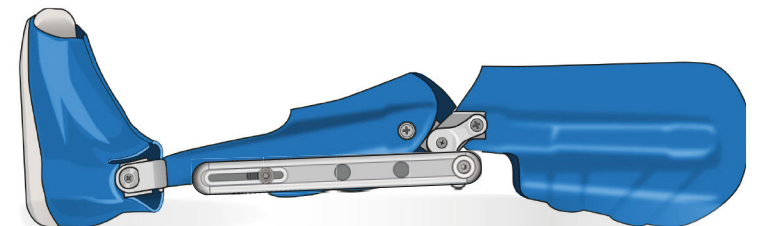

Nachtlagerung in fixierter Stellung

Anziehhilfe beim Anziehen

Das Anziehen einer Gehorthese sollte möglichst einfach gestaltet sein, da es sich um eine alltägliche Handlung handelt. Je unkomplizierter dieser Vorgang ist, desto selbstverständlicher lässt er sich in den täglichen Ablauf integrieren. Dies steigert nicht nur die Selbstständigkeit sondern auch die Lebensqualität aller Beteiligten. Die Anziehhilfe Rudi erleichtert das Anziehen von Orthesen mit Kniestreckunterstützung. Sie wird **zunächst auf die erforderliche Länge eingestellt** und anschließend über den Zylinder gesteckt und durch Magnete fixiert. Sobald die Orthese gestreckt wird, ist die Krafteinheit in der Anziehhilfe sicher fixiert.

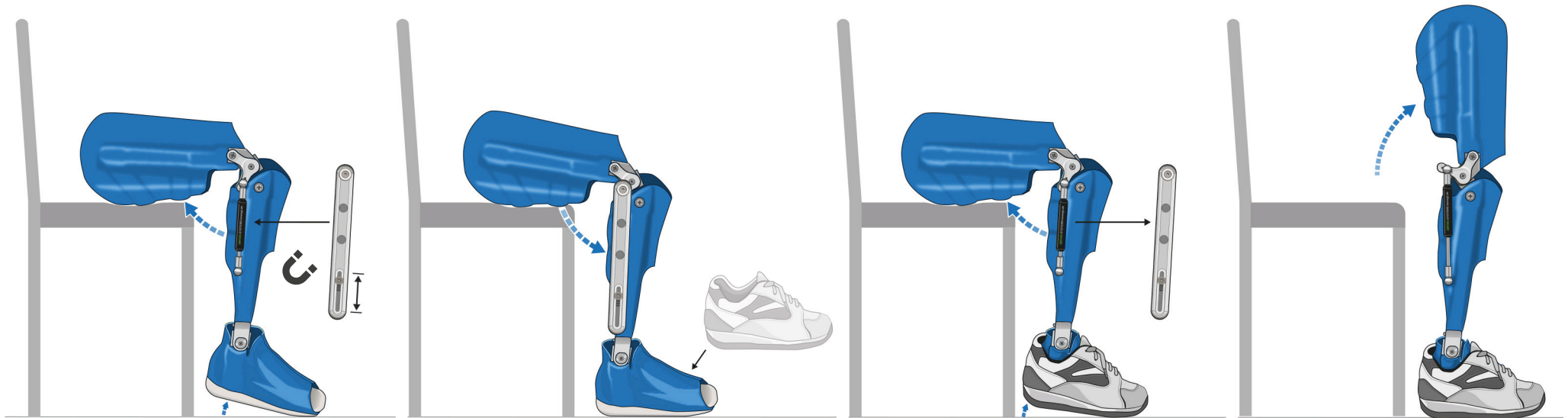


Orthese platzieren,
Knie beugen, um Anziehhilfe
Rudi aufzusetzen

Knie wieder strecken,
um Rudi zu spannen,
Orthese anziehen,
Schuh anziehen

Knie beugen, um Anziehhilfe
Rudi zu entlasten,
Anziehhilfe Rudi entnehmen

aufrichten, losgehen

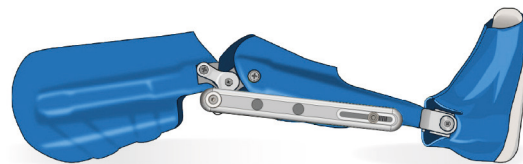

Alternativ:
An- und Ausziehen im Liegen

und Ausziehen

Die Anziehhilfe sorgt für eine kontrollierte Fixierung, erleichtert dabei den Ausstieg aus der Orthese. Sobald die Orthese leicht gebeugt wird, kann die Anziehhilfe gegen die Magnetkraft wieder entfernt werden.

